

## **Používání 3D masek**



Maska má rozsah použití a ochrany podobný jednorázovému respirátoru kvality FFP2. výhodou je možnost opakovaného použití při dodržení všech bezpečnostních opatření.

Při nošení masky v prostředí, kde může být postříkána odpadní vodou nebo kde se vyskytuje pára z odpadní vod a aerosol, mějte vždy přes obličej a masku **ochranný štít**.



Při sundávání nebo urovnávání masky se nedotýkejte přední části, uchopte masku za kraje masky nebo za gumičky. Stejně postupujte při opakovaném použití nedezinfikované masky, nebo použijte na nasazení gumové (jednorázové) rukavice.

Před nasazením a po sundání masky si vždy dezinfikujte ruce (nebo rukavice, pokud pracujete v rukavicích). Masku uchovávejte při transportu v mikrotenovém sáčku. Po vyjmutí použité masky sáček zlikvidujte, nepoužívejte opakovaně.

Při viditelném poškození masky nebo znečištění filtru přestaňte masku používat!

### **Před opakovaným použitím masku dezinfikujte.**

#### Dezinfekce masky

Dezinfekci masky provádějte v jednorázových rukavicích.

Na papírový ubrousek nebo čistý hadřík nastříkejte nebo nalijte dezinfekci a plastové tělo masky důkladně otřete.

Dezinfekci filtrační vložky lze provádět jen čistým lihem! Přípravky jako Anti-Covid snižují prodyšnost filtru.

Nechte oschnout na dobře větraném místě (lze použít sušičku na 30 °C). Pokud masku použijete dříve než za 3 dny po posledním použití, uveďte si, že vnější část textilního filtru může být infekční.

Pokud byla maska potřísněna odpadní vodou, uložte masku do mikrotenového pytlíku. Poté ji opatrně rozeberte, filtr vyhodte, masku opláchněte vlažnou vodou s mýdlem a vydezinfikujte.

#### Poznámka

Postupně budou k dispozici filtry na výměnu. Když bude maska chráněna proti potřísnění obličejovým štítem, je možné masku bezpečně používat opakovaně.